


コンパクトで身体に装着できる
電気刺激装置

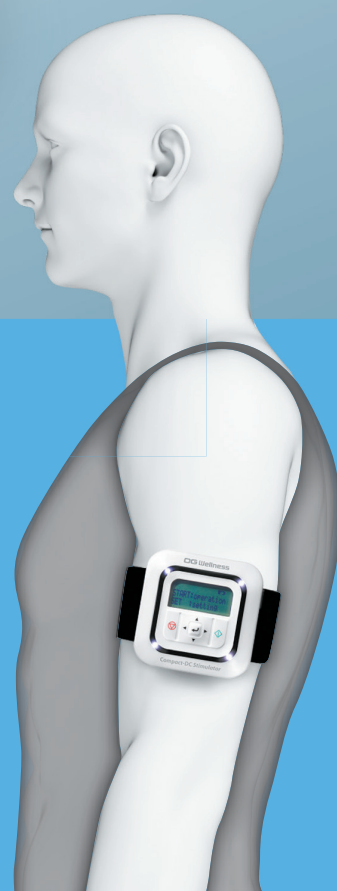

Wearable

75mm
×
75mm





Compact-DC Stimulator

Neuro Modulation

新しいリハビリテーションへの第一歩

Compact-DC Stimulatorは、ニューロモデュレーション分野に開発された電気刺激装置です。

運動療法や作業療法などのリハビリテーションと組み合わせて使用できるように、

持ち運びが容易で、身体に装着できるコンパクト化とウェアラブル化を実現。

医療や研究現場の治療の可能性を広げます。

Wearable

小型化により、腕への装着が可能。
リハビリテーションと組み合わせた治療ができます。

Direct Current

最大2.0mAの微弱な直流電流で治療ができます。

Simple

シンプルな操作性で、
簡単に操作をおこなうことができます。

3-Hour Battery

2.0mA出力で約3時間の連続使用ができます。
充電はユーザーで交換することができます。

Made in Japan

国内自社生産の機器なので、
メンテナンスを迅速におこなうことができます。

USB Battery Charger

充電は一般のUSB充電器を使用できます。
使い切った状態から4時間以内で満充電できます。

Log Database

250件の治療記録を残すことができ、
パソコンにデータを転送して保存することができます。

Inspect Resist

導子がかちんと装着されているか
確認することができます。

Electrical
Stimulation
Therapy



Compact Size

身体に装着できるウェアラブルなコンパクトサイズ
(小型・軽量・充電機能)



Safety & Perfect Fit

安全にきちんと体に装着
できる本体固定バンド、
導子固定バンド

Direct Current Mode + Pulse Mode Sham Mode

3つの出力モードと細かなパターン設定


直流モード

パルスモード


シャムモード

Compact-DC Stimulatorは、「直流モード」「パルスモード」の他に「シャムモード」も搭載した低周波治療器です。電流値、刺激時間、Ramp Up/DownのRateを設定した出力が可能で、パルスモードはパルス幅・周期なども設定できます。16件の出力パターン記憶と、250件の治療ログ保存ができます。

直流モード

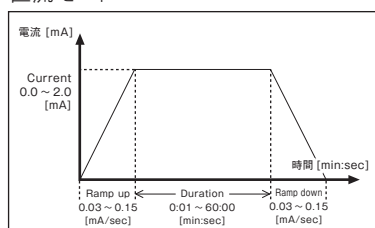

パルスモード

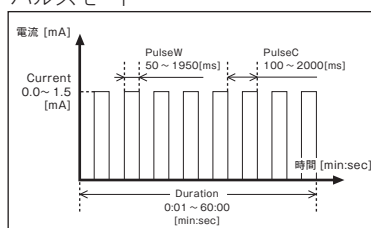

コンパクト DC スティミュレーター GD-800 ¥498,000

販売名	電気刺激装置 GD-800
JMDNコード	35372000
認証番号	302AABZX00042000
一般の名称	低周波治療器
クラス分類	管理医療機器 / 特定保守管理医療機器
電源	DC3.7V (内蔵リチウムイオン充電電池)
電源入力	5V-500mAmax (microUSBケーブルによる給電)
外形寸法	約75×75×44 (H) mm
質量	約140g以下
出力波形	直流 / パルス
最大出力電流	2.0mA (0.1mA刻みで設定)
刺激時間	1秒～60分 (1秒刻みで設定)
連続使用時間	3時間 (2.0mAで使用した場合)
モード	直流モード / パルスモード / シャムモード
安全装置	過充電保護機能、過電流保護機能、 バッテリー通信異常報知機能、 過電圧保護機能、電池残量低下報知機能、 電池温度異常監視機能
その他	出力パターン記憶16件、治療ログ保存250件

標準付属品

	商品名 / 品番 / 最小発注単位 / 価格		
01.リチウムイオン充電電池	GD800-001	1個	¥12,000
02.microUSBケーブル	GD800-003	1本	¥2,500
03.導子コード	GD800-004	1本	¥12,000
04.データ転送ソフト用DVD	GD800-002	1枚	¥2,000
05.導子固定バンド (大)	GD800-005	1個	¥24,000
06.導子固定バンド (小)	GD800-006	1個	¥8,000
07.本体固定バンド	GD800-008	1個	¥9,000
08.角型導子 (50×70mm)	GD800-009	1袋 (2枚)	¥12,000
09.スポンジ (角型導子 50×70mm用)	GD800-014	1袋 (ピンク、ブルー各1枚)	¥3,200
10.携帯ケース (250×155×80mm)	GD800-019	1個	¥6,000

オプション


	商品名 / 品番 / 最小発注単位 / 価格		
11.導子固定バンド	ELR-619	1袋 (1個)	¥2,500
12.角型導子 (50×50mm)	GD800-010	1袋 (2枚)	¥12,000
13.円型導子 (大)	GD800-011	1袋 (2枚)	¥12,000
14.円型導子 (中)	GD800-012	1袋 (2枚)	¥12,000
15.円型導子 (小)	GD800-013	1袋 (2枚)	¥12,000
16.スポンジ (角型導子 50×50mm用)	GD800-015	1袋 (ピンク、ブルー各1枚)	¥3,200
17.スポンジ (円型導子 大用)	GD800-016	1袋 (ピンク、ブルー各1枚)	¥5,200
18.スポンジ (円型導子 中用)	GD800-017	1袋 (ピンク、ブルー各1枚)	¥4,000
19.スポンジ (円型導子 小用)	GD800-018	1袋 (ピンク、ブルー各1枚)	¥3,500

※本製品は、浜松医科大学 田中悟志先生・名古屋工業大学 クグレ マウリシオ先生のご発明とご指導のもとに開発した製品です。

標準付属品



オプション

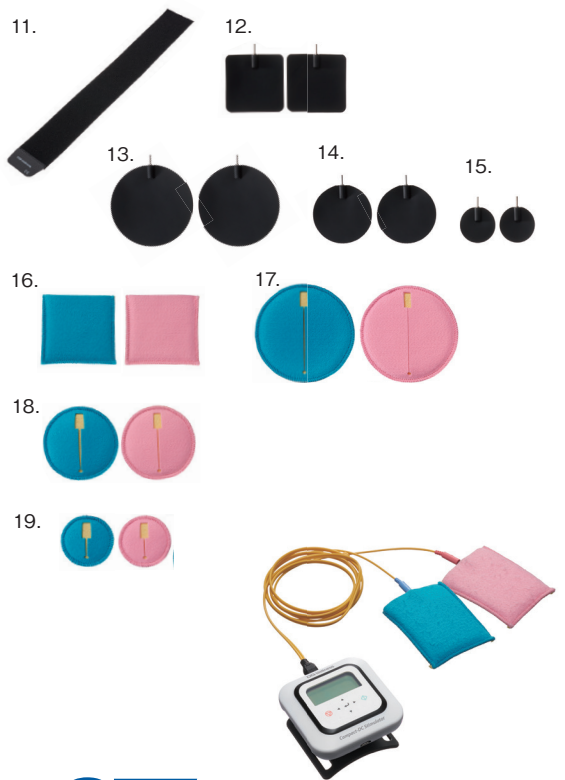

6年間保証

- 管理医療機器 (クラスII)
- 特定保守管理医療機器

物理療法機器・リハビリ機器・介護用入浴機器

オージー技研株式会社 www.og-wellness.jp

岡山本社

〒703-8261 岡山県岡山市中区海吉1835-7
Tel. 086-277-7181 Fax. 086-274-9072

東京本社

〒100-6004 東京都千代田区霞が関3-2-5霞が関ビルディング4階
Tel. 03-3519-5025 Fax. 03-3519-5020

事業所

札幌営業所 011-841-9777	横浜営業所 045-820-2106	高松営業所 087-837-8055
盛岡営業所 019-645-1255	名古屋支店 052-587-2290	広島営業所 082-832-2788
仙台営業所 022-308-6477	金沢営業所 076-233-2765	九州支店 0942-81-1778
新潟営業所 025-226-7251	大阪支店 06-6385-1525	鹿児島営業所 099-285-7676
埼玉支店 048-840-3233	神戸営業所 078-978-1680	那覇出張所 098-941-1686
東京支店 042-580-1423	岡山営業所 086-276-8384	

取扱店

[休日受付コールセンター]

☎ 0120-33-7181 受付時間 / 9:00~17:00

○休日専用/土・日・祝・年末年始 (平日は、最寄りの事業所へご連絡ください。)

○表示の価格等は物価変動等により変更する場合があります。また、記載価格は消費税抜きであり、消費税非課税物品につきましては、価格の後に「非課税」と記述しています。
○印刷インク等の都合上、記載写真と現品の色が多少異なる場合がありますのでご了承ください。○仕様および外観等は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

本記載内容は2020年6月現在のものです。 KN_2006_197